

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。この取扱説明書は、正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されていますので、ご使用前によくお読み下さい。また、お読みになった後も大切に保管し、必要な時にお役立て下さい。

## 安全上の注意

**【記号の説明】** この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために、特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。各マークの意味を十分に理解されたうえでご使用していただきますようお願いいたします。


**警告** : 取扱いを誤った場合、死亡又は重大な傷害を負う可能性のあるもの

**注意** : 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負ったり物的損害につながる可能性のあるもの

- 警告**
- ・使用者がご自身の安定を十分に保てない場合は、介助者の付き添いの上使用して下さい。
  - ・本品は必ず浴槽の蛇口と反対位置で、浴槽の端に寄せて取付けて下さい。浴槽の中間で使用したり、隙間をあけて使用すると本品の移動により、転倒、ケガの原因となります。
  - ・本品の上に立ち上がらないで下さい。転倒する恐れがあります。
  - ・体や本品にシャンプーや石けんがついたままですと、滑りやすく危険です。洗い流してから使用して下さい。
  - ・2人同時に腰掛けしないで下さい。ボードが破損する恐れがあります。
  - ・本品の使用目的以外の使用は避けて下さい。破損・ケガをする恐れがあります。
  - ・本品を浴槽の中央付近へ取付けしないで下さい。また、本品と浴槽の間に隙間を作らないで下さい。浴槽と本品の間に使用者が落ち込み、転倒、ケガの原因となります。
  - ・子供の遊び道具として使用させないでください。ケガ、事故の恐れがあります。

- 注意**
- ・子供だけの使用は避けて下さい。ケガ、事故の恐れがあります。
  - ・万一破損した場合は使用を中止して下さい。ケガをする恐れがあります。
  - ・介助者が付き添われる場合は、介護を受ける方の状態に合わせて適正な入浴方法に変えて下さい。購入店、介護センターなどでご相談されることをお勧めします。
  - ・ボードの4隅の長穴に指を挟まないようにして下さい。ケガをする場合があります。
  - ・固定具を浴槽のふちに乗せて使用しないで下さい。また、固定具と浴槽のふちとの幅が合わない場合に、無理に上から押し込まないで下さい。固定具が破損する恐れがあります。
  - ・**取付可能な浴槽内寸法は55～68cmです。**本品が浴槽のサイズに合わないときは、本品が外れる恐れがありますので使用しないで下さい。特殊な形状の浴槽には取付けできない場合があります。
  - ・本品の改造はしないで下さい。また、部品の代用品は使用しないで下さい。
  - ・本品でお湯をかきまぜたり、浴槽の中に入れて使用しないで下さい。
  - ・壁などに立てかけないで下さい。倒れて本品が破損する恐れがあります。
  - ・直射日光に当てないで下さい。変形・変質の恐れがあります。
  - ・火気に近づけないで下さい。変形・変質の恐れがあります。
  - ・風呂蓋の代わりにしないで下さい。プラスチックが変形、または、破損し、ケガの原因となります。
  - ・取り外した本品に乗らないで下さい。本品が破損する恐れがあります。

## 各部の名称

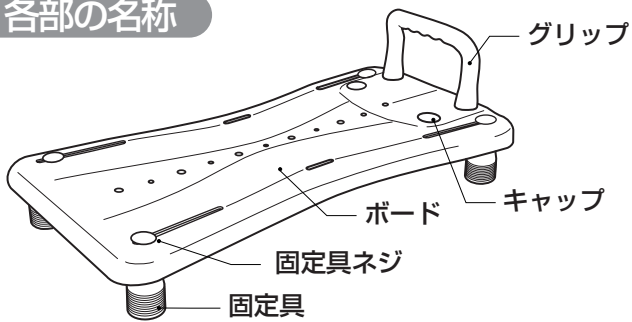


## 特長

- 出入りしやすい丸みのある形状です。
- 浴槽の内側に合わせてしっかり固定できます。
- 手すりの位置が選べます。
- くびれ形状でお風呂が広く使えます。

## 取付け可能な浴槽寸法

浴槽内寸55~68cm  
に取付け可能。

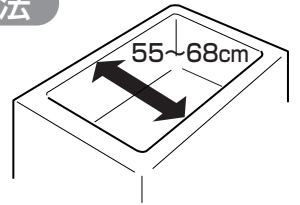


## 用途

本品は浴槽への出入りを補助する目的でお使い下さい。

- 特殊な形状の浴槽には取付けできない場合があります。

梱包内には下記の部材が入っています。組立前に内容をご確認下さい。

### 【部材一覧】

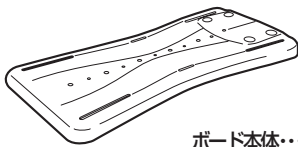


ボード本体...1個

#### ●ボード本体に取付け済み部材内容



キャップ...4個

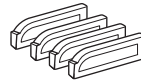

ボード滑り止め...4個

#### ●付属品




六角レンチ...1個

#### ●固定具に取付け済み部材内容




←組込み状態


#### ●各部材内容

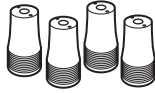


固定具...4個

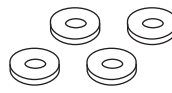

ゴム座金...4個

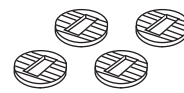


スライド板...4個

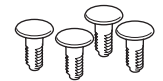

固定具ネジ...4個

#### ●グリップに取付け済み部材内容

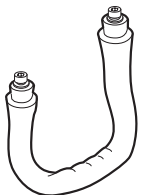

←組込み状態

#### ●各部材内容



グリップ...1個



グリップ  
固定ネジ...2個



スプリング  
ワッシャー...2個




平座金...2個

## 組立方法


### 1-1 固定具を取付けます。

固定具に取付けられた部材を外します。

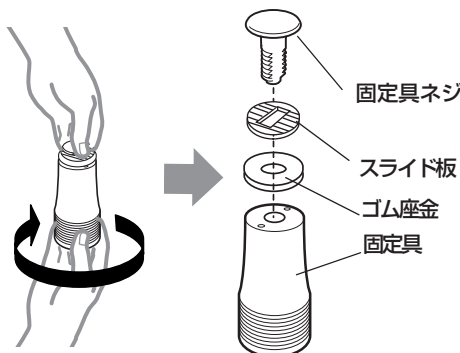


### 1-2

固定具ネジをボードの表側からボード本体の4隅にある長穴に差し込みます。

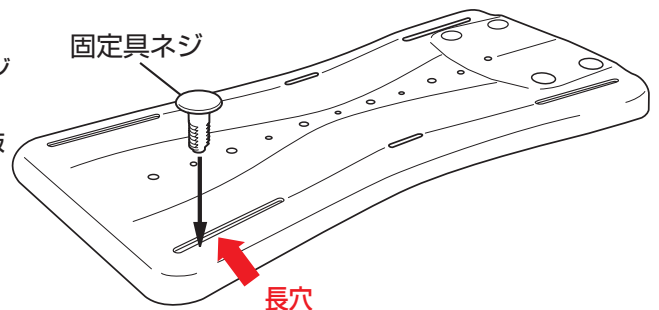


### 1-3

スライド板をボードの裏側から固定具ネジに差し込みます。

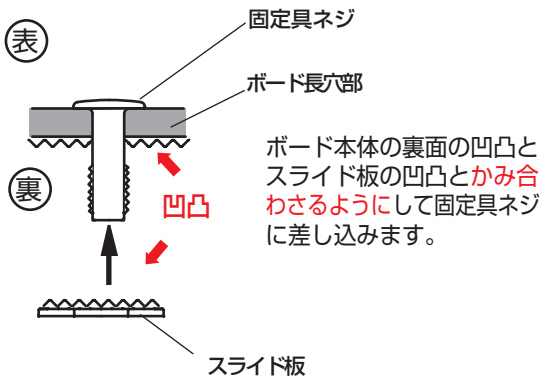


### 1-4

次にゴム座金をボードの裏側から固定具ネジに差し込みます。

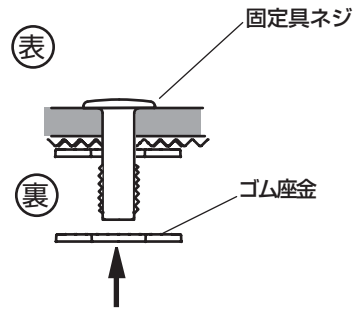


### 1-5

固定具ネジに固定具を回し込んで仮止めします。

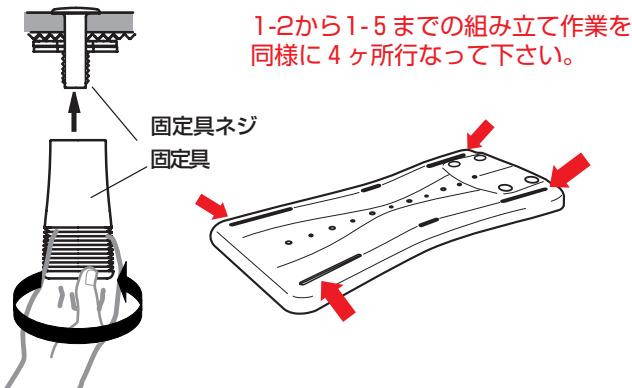


### 2-1

ボード本体に取付けられたキャップを外します。

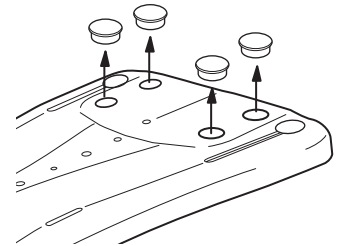

### 2-2


グリップに取付けられた部材を外します。

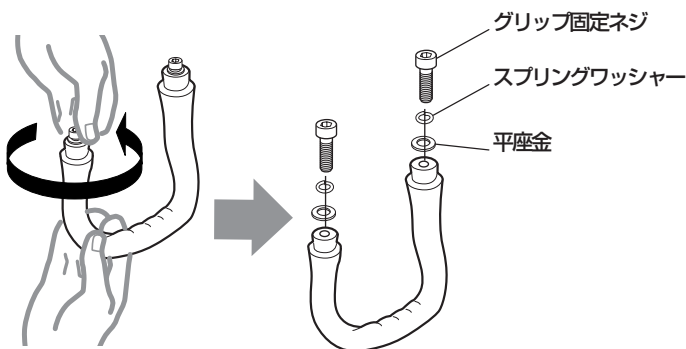

### 2-3

グリップの向きを確認します。


ボードに取付ける前にグリップの向きを確認して下さい。**グリップの向きは傾き**が有る側を**内側**にして取付けるようにして下さい。

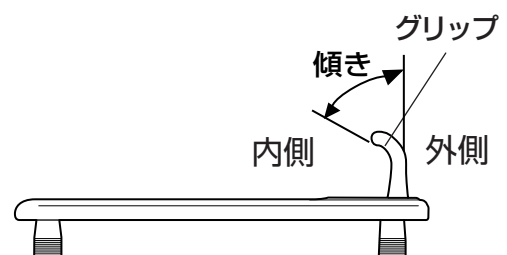

## 2-4

グリップをボード本体に取付けます。


キャップを取外した穴にグリップを差し込みます。  
ハンドルの位置は、奥側とやや手前側の2ヶ所が選べます。使う人の体格に合わせて位置を決めて下さい。

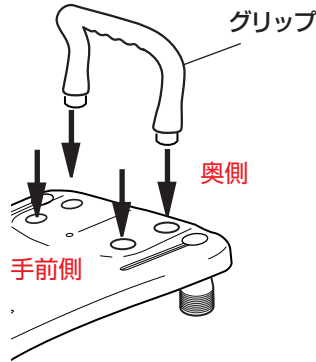

## 3-1 キャップを取付けます。

ボード裏にキャップを取付けます。


グリップを取付けた場所をキャップでふさぎます。

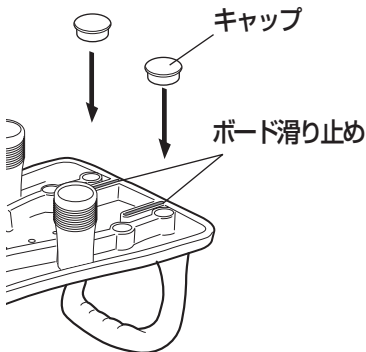

## 3-2

ボード表にキャップを取付けます。

ボード表側のグリップを取付けない穴 (2穴) もキャップでふさぎます。

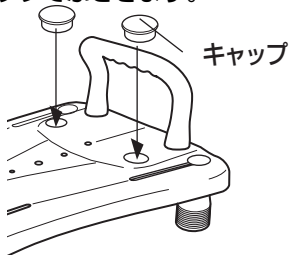


### 注意

グリップを付けない側の穴 (2穴) は、必ずキャップでふさいで下さい。指が穴に入り、ケガをする恐れがあります。

## 2-5

グリップとボード本体を固定します。

穴に差し込んだグリップを付属の六角レンチを使って、グリップ固定ネジで締めつけて2ヶ所とも確実に固定して下さい。

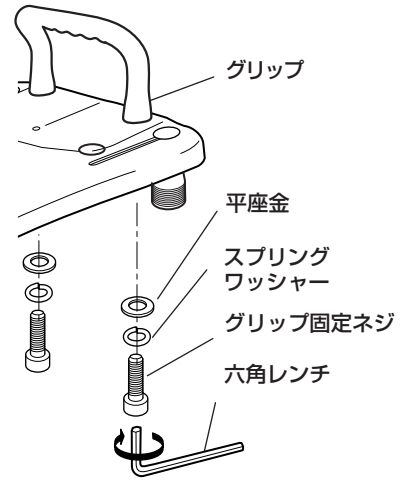


### 注意

- ・グリップが穴にはめにくい場合は、グリップの幅を開き気味にしなが差し込んで下さい。
- ・ネジがしっかりと固定されていないと、ハンドルががたついたり、外れたりする恐れがあります。使用中に、ハンドルががたついたら、付属の六角レンチで増し締めして下さい。

## 4 完成

最後に各部材が正しく取付けられているかご確認下さい。

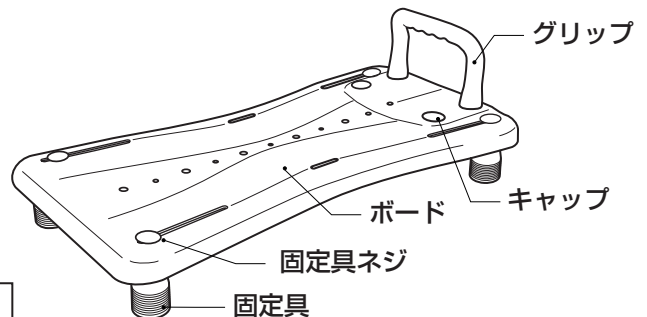


# 取付け方法

ご使用になる前に必ず製品各部が正しく取付けられているかご確認下さい。

## 1 ボードの取付け位置を決めます


- ・浴槽の蛇口と反対側の位置に 設置して下さい。
- ・グリップの無い側を浴槽へ出入りする側に設置して下さい。

### ●正しい取付け状態

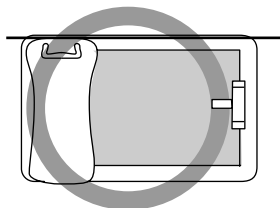


ボードは蛇口と反対の位置に、浴槽の端に寄せて下さい。

### ●ボードが中間位置にある場合

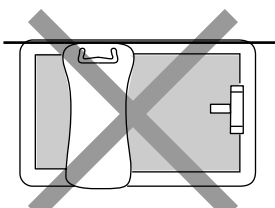


ボードは中間付近に取付けしないで下さい。ボードが移動し、ケガの原因になります。

### ●ボードが斜めに取付けられている場合

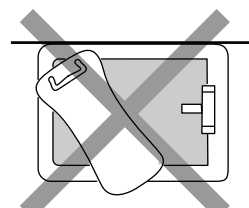


ボードは斜めに取付けしないで下さい。ボードが外れる恐れがあります。

### ●ボードが浴槽からはみ出している場合

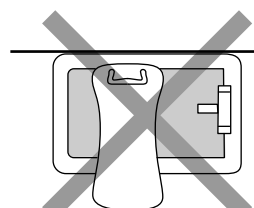


浴槽へ出入りする側がふちからはみ出さないようにして下さい。ボードが起き上がって外れ、落ちる恐れがあります。

### ●正しい取付け状態

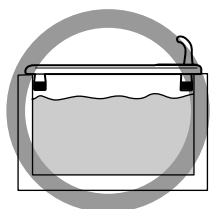


全ての固定具が浴槽の内壁に当たるように固定して下さい。

### ●浴槽のふちに固定具が乗っている場合

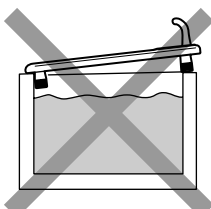

固定具を浴槽のふちの上に乗せて使用しないで下さい。ボードが移動し、ケガの原因になります。


### ●固定具が浴槽のふちと隙間がある場合

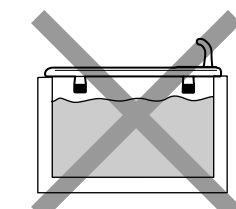

固定具と浴槽のふちとの間に隙間を作らないようにして下さい。体重をかけた時にボードが動く恐れがあります。


## 2 ボードを浴槽に乗せます。

全ての固定具を浴槽の内側に当たるようにスライドさせます。ボードを確実に浴槽に取付けてご使用いただくために、以下の寸法を確認して下さい。

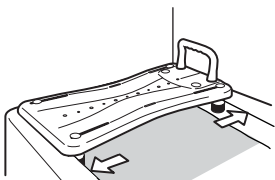

## 3 ボードを浴槽に固定します。


しっかりと固定具を締め、確実に固定します。その際、固定具が全ての浴槽の内壁に当たっている状態で固定されているか確認して下さい。

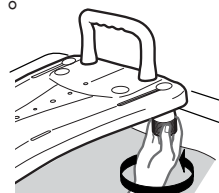


### ⚠ 注意

- ・ボードの両端が浴槽のふちに**2cm以上** 乗っていることを確認して下さい。
- ・浴槽の内壁から浴室の壁まで**3cm以上** あることを確認して下さい。

2cm以上

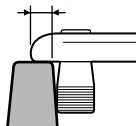


3cm以上

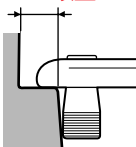

### ⚠ 注意

- ・固定具の締め具合が不十分だと、固定具の破損やボードが外れる恐れがあります。
- ・固定具と浴槽の内壁の幅が合わない場合に、無理に上から押し込まないで下さい。固定具ネジが破損する恐れがあります。

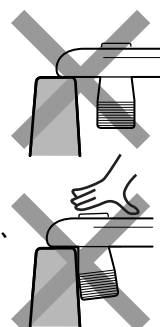


## 使用方法


…使用者がご自身の安定を十分に保てない場合は、介助者の付き添いの上使用して下さい。

- 介助者が付き添われる場合は、介護を受ける方の状態に合わせて適正な入浴方法に変えて下さい。購入店、介護センターなどでご相談されることをお勧めします。

1 ボードになるべく深く腰かけて下さい。

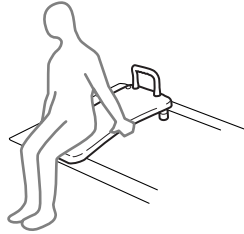


2 順手でグリップにつかまって下さい。

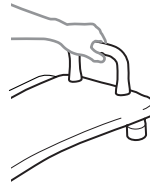


⚠ 注意

グリップはボードの上で体を支えるためのものです。グリップだけを握って、持ち上げたり、引っばったりしないで下さい。


3 グリップを握って体の安定を保ちながら、浴槽の中に片方ずつ足を入れて下さい。

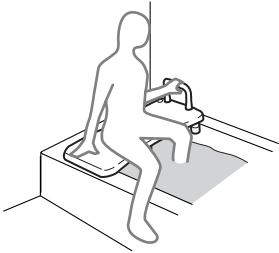

4 浴槽の底に足がついたら、グリップにつかまったらま体の向きを反対側に変えます。

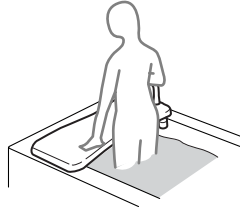

5 そのまま静かにお湯の中に体を沈めます。

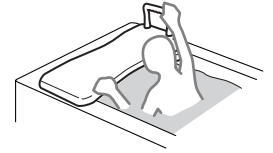

浴槽から出る時は、入る時の逆の手順で行って下さい。

## お手入れ方法

- 適量に薄めた中性洗剤をしみ込ませた布またはスポンジで汚れを取り、水洗いした後乾いた布などで水分をきれいにふき取って下さい。

## お手入れ上のご注意

- 酸性・アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、および、クレンザー、たわしなどの使用は、製品の変質・変色・傷みの原因となります。
- 熱湯をかけないで下さい。変色・変形の原因となります。
- 直射日光の当たる場所に保管しないで下さい。ひび割れ、変色の原因となります。
- 濡れたままで保管するとカビが発生しやすくなりますので、使用後は乾いた布で水気をふき取って下さい。

## 仕様

品名	浴そうボード	
サイズ	幅74×長さ36×高さ25 (cm)	
材質	ボード本体・固定具芯部・グリップ	／ ポリプロピレン
	ボード滑り止め・キャップ・固定具滑り止め部	／ エラストマー
	スライド板・固定具ネジ	／ ポリアセタール
	ゴム座金	／ NBR
	グリップ固定ネジ・スプリングワッシャー・平座金	／ ステンレス
重量	約 3.4 kg	

- 本品に関する修理対応はいたしておりません。交換部品のお問い合わせ、ご相談は下記でお受けいたします。
- 製品の外観及び仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。  
また、この商品がご不用となった時、リサイクルしますので送料お客様負担でお送り下さい。

## 株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957 (受付時間 9:00~17:00)  
<http://www.richell.co.jp/>

